

Catálogo: K117-1

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 500

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters				Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)	
Method No.	#	Name	TRI	R1	Enzimático	200	0
Print Name	Triglicérides Bioclin			R2			
Sample Type	Serum			Diluent			
Unit	mg/dL			Decimal Points	2		
Assay Type	End						
Measuring Points	Start	End					
	1	33	-	34			
	2	0	-	0			
Wavelength	Pri	510	Sec.	<input type="checkbox"/>	Dis.	-	
Normal	Normal Range						
	Nº	Range Name	Min	Máx			
	1	Male-G1	0.00	0.00			
	2	Male-G2	0.00	0.00			
	3	Male-G3	0.00	0.00			
	4	Female-G1	0.00	0.00			
Normal	Technical Range						
	Conc.	3.0	-	900.0			
	(mAbs./10)	-999999	-	999999			
Dilution	Sampling	Sample	Diluent				
	2.0	< 0.0	<	0.0			
Rerun (High/Prozone)	2.0	< 0.0	<	0.0			
Rerun (Low)	2.0	< 0.0	<	0.0			
Reaction	Increase			SPT Wash	Enable		
				Reagent Name			
				Stirring Speed	R1	Middle	R2

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.