

Catálogo: K040

ÁLBUMINAMONORREAGENTE

Nº de Testes: 833

Versão: 31/01/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K040-1

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

Geral	
Nome	Albumina Monorreagente
Marca	Bioclin
Tipo	P.F. c/ Bco de Reag
C.O. Principal (nm)	600
C.O. Bicromático	0
Unidade	g/dL
Decimal	2
Dispensado	
Vol. Amostra (µl)	3
Vol. R1 (µl)	300
Vol. R2 (µl)	0
T. Disp. Reag. 2 (Seg.)	0
Índice de Deterioração do Reagente	
Min.. (Abs)	0
Max. (Abs)	2
Intervalo de Verificação	16h
Fator	
Método Decrescente	No
Fator	No
Calibrador	Yes
Concentração Cal	*Biocal
Fator	-
Interpolação	Linear
Valores Referência	
Idade Max.	**
Idade Min.	**
Sexo	Qualquer
Valor Max.	3.5
Valor Min.	5.5

Especiais	
Opções do Tipo de Método	
T. de branco de reagente	300
T. Incubação	300
Intervalo entre brancos	72
Repetição	-
Limite Linear	6
Avançadas	
Gap Ar Inicial	2 µl
Veloc. Gap Inicial	500
Gap. Separação Reat/Amostra	2 µl
Veloc. Gap Sep. Reat/Amostra	500
Veloc. Aspiração R1 + Amostra	2500
R2 Veloc. de Dispensação	2500
R1 Veloc. de Aspiração	2000
R2 Veloc. de Aspiração	2000
Diluição com	Amostra
Vol. Mín. Amostra	2 µl
Veloc. Asp. Amostra	500
Volume Extra	0 µl
Lavagens para Evitar Interferentes	
Lavagens por Auto Interferência	0
Solução de Limpez. Auto Interf.	--
Tempo de Lavag. de Auto Interf.	0
Método	Lavagens
1 – Prot. Totais	1
2	0
3	0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.