

Catálogo: K139-1

**ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 100

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K139-1.0**

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
NOME	ÁCIDO ÚRICO
PRI	510
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	mg/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	1.5
VR. AL	7.0
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	6.0
CONF: LIN. REAG.	20.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 6,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.