

Catálogo: K040-1

**ALBUMINA MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 250

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K040-1**

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
NOME	ALBUMINA
PRI	630
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	g/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	3.5
VR. AL	5.5
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	3.8
CONF: LIN. REAG.	6.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.