

Catálogo: K046

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 60

Versão: 01/11/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

MODO	CINÉTICO
NOME	AMILASE
PRI	405
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	U/L
RE	30
INT	180
BR	NÃO
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	0.0
VR. AL	90.0
PAD	NÃO
FATOR	3954
DO INICIAL	0.800
DELTA MÁX	0.200
LIN. REAG.	2000.0

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.