

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 26/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
NOME	BIOPROT
PRI	578
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	mg/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	1.0
VR. AL	15.0
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	65.0
CONF: LIN. REAG.	100.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.