

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 50

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K084-2

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente N°3 – Padrão – 1 x 3 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do reagente N° 1 com 1 (uma) parte do reagente N° 2. O Reagente de Trabalho é estável durante 2 semanas entre 2 e 8°C.

MODO	PONTO FINAL
NOME	LACTATO
PRI	340 nm
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	mg/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	4.5
VR. AL	19.8
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	30.0
CONF: LIN. REAG.	120.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 3 (Padrão 30,0 mg/dL) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.