

Catálogo: K025

LIPASE

Nº de Testes: 20

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO

K025

Reagente N°1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N°2 – Inibidor Enzimático – 1 x 1 mL

Reagente N°3 – Reagente de Cor – 1 x 4 mL

Reagente N°4 – Substrato – 1 x 2 mL

Reagente N°5 – Acetona – 1 x 80 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	LIPASE
MODO	DIFERENCIAL
PRI	405
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	U/L
RE	5
INT	0
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	2.0
VR. AL	15.0
PAD	NÃO
FATOR	143
CONF: LIN. REAG.	300

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.