

Catálogo: K116-2

MAGNÉSIO MONOREAGENTE

Nº de Testes: 200

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K116-2

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 2 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
NOME	MAGNÉSIO
PRI	510
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	mg/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	1.6
VR. AL	2.4
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	2.0
CONF: LIN. REAG.	5.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 2,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.