

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 07/03/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
NOME	PROT TOTAIS
PRI	546
SEC	-
TEMP	37°C
KF	1.00
VOL	700
UNIDADE	g/dL
RE	5
INT	-
BR	SIM
CQ	NÃO
NORMAL	SIM
VR. BA	6.0
VR. AL	8.0
PAD	SIM
NÚMERO DE PADRÃO	1
CONCENTRAÇÃO	4.0
CONF: LIN. REAG.	12.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.