

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K040-1

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	ALBUMINA
FILTRO	620 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	500 µL
UNIDADE	g/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	3.8
ABS PADRÃO MÍN	#
ABS PADRÃO MÁX	#
BLANK	SIM
BLANK AMOSTRA	NÃO
LIN MÍN	0.0
LIN MÁX	6.0
REF MÍN	3.5
REF MÁX	5.5
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.