

Catálogo: K046-1

**AMILASE CINÉTICA**

Nº de Testes: 60

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K046-1**

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

TIPO	CINÉTICA
NOME	AMILASE
FILTRO	405 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	500 µL
UNIDADE	U/L
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO INICIAL	30
NUM INTERVALOS	3
INTERVALO	60
INCLIN.	CRESCENTE
CÁLCULO	FATOR
FATOR	3954
REF MÍN	0.0
REF MÁX	90.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000
DELTA MÁX	0.330 A
DELTA VAR	10.0 %
LISTAR DELTAS	SIM

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.