

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K108-1**

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente Nº3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	BIOPROT
FILTRO	500 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	500 µL
UNIDADE	mg/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	65.0
ABS PADRÃO MÍN	#
ABS PADRÃO MÁX	#
BLANK	SIM
BLANK AMOSTRA	NÃO
LIN MÍN	1.7
LIN MÁX	100.0
REF MÍN	1.0
REF MÁX	15.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.