

Catálogo: K082

GLICOSE MONOREAGENTE

Nº de Testes: 500

Versão: 15/10/2021

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K082-2

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	GLICOSE
FILTRO	500 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	500 µL
UNIDADE	mg/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	100.0
ABS PADRÃO MÍN	#
ABS PADRÃO MÁX	#
BLANK	SIM
BLANK AMOSTRA	NÃO
LIN MÍN	0.0
LIN MÁX	500.0
REF MÍN	65.0
REF MÁX	99.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	3.000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 100,0 mg/dL) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#). Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.