

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 50

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K084-2**

Reagente Nº1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente Nº2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente Nº3 – Padrão – 1 x 3 mL

**PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:**

Misturar 4 partes do Reagente Nº 1 com 1 (uma) parte do Reagente Nº 2. O Reagente de Trabalho é estável durante 2 semanas entre 2 e 8°C.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	LACTATO
FILTRO	340 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	700 µL
UNIDADE	mg/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	30.0
ABS PADRÃO MÍN	#
ABS PADRÃO MÁX	#
BLANK	SIM
BLANK AMOSTRA	NÃO
LIN MÍN	1.0
LIN MÁX	120.0
REF MÍN	4.5
REF MÁX	19.8
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 3 (Padrão 30,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.