

Catálogo: K088-27

LDL DIRETO

Nº de Testes: 50

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K088-27

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 30 mL

Reagente N°2 – Reagente de Cor – 1 x 10 mL

Reagente N°3 – Calibrador – 1 x 5 mL

PREPARO DO CALIBRADOR (REAGENTE N° 3) _ APRESENTAÇÃO 27:

Abrir cuidadosamente o frasco e adicionar exatamente 5 mL de água destilada. Homogeneizar e deixar em repouso por 30 minutos. Evite a formação de espuma e que o material fique aderido à parede do frasco. Estável por 1 semana entre 2 e 8°C.

TÉCNICA:

Em um tubo de ensaio pipetar 600 µL do Reagente N°1 (Enzimático) e 6 µL de Amostra ou Calibrador. Homogeneizar e incubar por 5 minutos em Banho-Maria a 37°C.

Em seguida, pipetar 200 µL do Reagente N°2 (Reagente de Cor), homogeneizar e aspirar imediatamente.

TIPO	CINÉTICA
NOME	LDL DIRETO
FILTRO	530 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	500 µL
UNIDADE	mg/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO INICIAL	30
NUM INTERVALOS	1
INTERVALO	180
INCLIN.	CRESCENTE
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	#
ABS. PADRÃO MÍN	#
ABS. PADRÃO MÁX	#
REF MÍN	0.0
REF MÁX	100.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000
DELTA MÁX	NÃO
DELTA VAR	NÃO
LISTAR DELTAS	SIM

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 3 - Calibrador (Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.