

Catálogo: K025

LIPASE

Nº de Testes: 20

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO

K025

Reagente N°1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N°2 – Inibidor Enzimático – 1 x 1 mL

Reagente N°3 – Reagente de Cor – 1 x 4 mL

Reagente N°4 – Substrato – 1 x 2 mL

Reagente N°5 – Acetona – 1 x 80 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	LIPASE
FILTRO	405 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	700 µL
UNIDADE	U/L
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	FATOR
FATOR	143
BLANK	NÃO
BLANK AMOSTRA	SIM
LIN MÍN	1.1
LIN MÁX	300.0
REF MÍN	2.0
REF MÁX	15.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.