

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 31/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TIPO	PONTO FINAL
NOME	PROT TOTAIS
FILTRO	530 nm
TEMPERATURA	37°C
VOLUME ASP.	700 µL
UNIDADE	g/dL
NUM. DECIMAIS	1
TEMPO LEITURA	3
CÁLCULO	PADRÃO
NÚM. PADRÕES	1
LEIT. PADRÃO	DUPLICATA
PADRÃO 1	4.0
ABS PADRÃO MÍN	#
ABS PADRÃO MÁX	#
BLANK	SIM
BLANK AMOSTRA	NÃO
LIN MÍN	0.0
LIN MÁX	12.0
REF MÍN	6.0
REF MÁX	8.0
ABS REAT MÍN	0.000
ABS REAT MÁX	0.300

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.