

Catálogo: K139-1

ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE

Nº de Testes: 277

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K139-1.0

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM	✓
NAME	ACU
IMUNOASSAY (NO)	0
TYPE (E.P)	2
INVERSE (NO)	0
% SMP VOL	18
FILTER P (500)	4
BIC CHEM (NO)	0
DELAY	5 00
BLANK (NO)	0
DEFAULT (NO)	0
% RGT VOL	72
UNITS (mg/dL)	2
UNIT FACTOR	1.000
DECIMAL	2
RBL LOW	0.000
RBL HIGH	0.300
RANGE LOW	0.0
RANGE HIGH	20.0
CAL FACT	#
STD VAL	#
NORMAL L	2.5
NORMAL H	7.0
SLOPE	1.000
INTERCEPT	0.000
EP LIMIT	0.010

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 6,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.