

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 714

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K040-1

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		ALB
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		7
FILTER P	(600)	6
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		1 30
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(g/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		1
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.370
RANGE LOW		0.0
RANGE HIGH		6.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		3.5
NORMAL H		5.5
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.015

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.