

Catálogo: K046-1

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 171

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

CHEM		✓
NAME		AMI
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE		0
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		14
FILTER P	(405)	3
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		0 SP 30
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(U/L)	3
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.400
RANGE LOW		3.5
RANGE HIGH		2000.0
CAL FACT		-
STD VAL		#
NORMAL L		0.0
NORMAL H		90.0
SLOPE		1.00
INTERCEPT		0.00
C1*10E-6		0.00
C2*10E-6		99999.01
D1*10E-6		20.0
DELTA		0.006

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.