

Catálogo: K107

**BILIRRUBINA DIRETA AUTOMAÇÃO**

Nº de Testes: 166

Versão: 30/10/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K107-1**

Reagente N° 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N° 2 – Reagente de Cor – 1 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		BILD
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		48
FILTER P	(550)	5
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		5 00
BLANK	(YES)	1
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		48
2ND RGT	(YES)	1
2 RGT VOL		12
2 RGT DELAY		4 30
A2 DLY		4 00
UNITS	(mg/dL)	2
UNIT FACTOR		1.0
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		1.000
RANGE LOW		0.0
RANGE HIGH		12.0
CAL FACT		-
STD VAL		#
NORMAL L		0.0
NORMAL H		0.4
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.010

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.