

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 71

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K108-1**

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		BIOPR
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		14
FILTER P	(600)	6
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		3 00
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(mg/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.300
RANGE LOW		1.7
RANGE HIGH		100.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		1.0
NORMAL H		15.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.010

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.