

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 285

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K051-2

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		CÁL
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		7
FILTER P	(600)	6
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		2 00
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(mg/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		2.500
RANGE LOW		0.0
RANGE HIGH		20.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		8.8
NORMAL H		11.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.010

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.