

Catálogo: K069	CK MB UV	Nº de Testes: 142	Versão: 29/10/2018
----------------	----------	-------------------	--------------------

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K069**

Reagente Nº 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Enzima - Substrato – 1 x 10 mL

**PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:**

Misturar 4 partes do Reagente Nº1 com 1 (uma) parte do Reagente Nº2. Estável durante 1 dia nas temperaturas de 15 a 30°C e 15 dias de 2 a 8°C.

CHEM		✓
NAME		CK MB
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(ZERO ORDER)	0
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		28
FILTER P	(340)	1
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		3 00
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(U/L)	3
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.350
RANGE LOW		2.3
RANGE HIGH		600.0
CAL FACT		-
STD VAL		#
NORMAL L		0.0
NORMAL H		25.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
C1*10E-6		0.000
C2*10E-6		99999.01
D1*10E-6		10.00
DELTA NUMBER		0.025

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.