

Catálogo: K094-1

COLINESTERASE

Nº de Testes: 100

Versão: 05/04/2020

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K094-1

Reagente N° 1 – Tampão Reagente – 1 x 20 mL

Reagente N° 2 – Substrato – 1 x 5 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Utilizar a proporção das Instruções de Uso (R1: 1000 µL + R2 : 250 µL). Preparar no momento do uso. Estável no máximo 24h.

CHEM	✓
NAME	CHE
IMUNOASSAY (NO)	0
TYPE (ZERO ORDER)	0
INVERSE (YES)	1
% SMP VOL (10)	5 µL
FILTER P (405)	3
BIC CHEM (NO)	0
DELAY	2 SP 00
BLANK (NO)	0
DEFAULT (NO)	0
% RGT VOL	250 µL
UNITS (U/L)	3
UNIT FACTOR	1.000
DECIMAL	0
RBL LOW	0.000
RBL HIGH	2.500
RANGE LOW	50
RANGE HIGH	25000
CAL FACT	-
STD VAL	#
NORMAL L	3930
NORMAL H	11500
SLOPE	1.000
INTERCEPT	0.000
C1*10E-6	0.000
C2*10E-6	99999.01
D1*10E-6	10.00
DELTA NUMBER	0.015

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.