

Catálogo: K068-1

FÓSFORO UV

Nº de Testes: 285

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K068-1**

Reagente N° 1 – Molibdato – 1 x 100 mL

Reagente N° 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		FOS
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		7
FILTER P	(340)	1
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		5 00
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(YES)	1
% RGT VOL		70
UNITS	(mg/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		1.500
RANGE LOW		0.1
RANGE HIGH		15.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		2.5
NORMAL H		4.8
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.010

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.