

Catálogo: K093-12

LIPASE AUTOMAÇÃO

Nº de Testes: 333

Versão: 30/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K093-12

Reagente Nº 1 – Tampão Reagente – 2 x 15 mL

Reagente Nº 2 – Substrato – 2 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		LIP
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(1 ST. ORDER)	1
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		6
FILTER P	(550)	5
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		3 00
INCUBATION		2 00
% RGT VOL		36
2ND RGT	(YES)	1
2ND RGT VOL		24
UNITS	(U/L)	3
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.300
RANGE LOW		3.0
RANGE HIGH		300.0
CAL FACT		1
REAG. RATE		0.000
STD VAL		#
NORMAL L		0.0
NORMAL H		60.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
LIN FACT		1.000
1ST LIN		0.100

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.