

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 714

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		PROT
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		14
FILTER P	(550)	5
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		3 00
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		70
UNITS	(g/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		1
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.200
RANGE LOW		0.0
RANGE HIGH		12.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		6.0
NORMAL H		8.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.015

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.