

Catálogo: K049-6

TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA

Nº de Testes: 333

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K049-6

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:

Misturar 4 partes do Reagente Nº 1 com 1 (uma) parte do Reagente Nº 2. O Reagente de Trabalho é estável 72 horas entre 15 e 30°C e 2 semanas entre 2 e 8°C.

CHEM	✓
NAME	ALT
IMUNOASSAY (YES)	0
TYPE (ZERO ORDER)	0
INVERSE (YES)	1
% SMP VOL	60
FILTER P (340)	1
DEP TEST (YES)	1
BIC CHEM (YES)	1
BIC FACTOR	1.000
DEP LIM	0.230
DELAY	1 30
% RGT VOL	60
UNITS (U/L)	3
UNIT FACTOR	1.000
DECIMAL	2
RBL LOW	0.560
RBL HIGH	2.500
RANGE LOW	1.4
RANGE HIGH	400.0
CAL FACT	-
STD VAL	#
NORMAL L	5.0
NORMAL H	38.0
SLOPE	1.000
INTERCEPT	0.000
C1*10E-6	0.000
C2*10E-6	99999.01
D1*10E-6	20.00
DELTA NUMBER	0.012

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.