

Catálogo: K117-1

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 333

Versão: 29/10/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K117-1

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CHEM		✓
NAME		TRIG
IMUNOASSAY	(NO)	0
TYPE	(E.P)	2
INVERSE	(NO)	0
% SMP VOL		6
FILTER P	(500)	4
BIC CHEM	(NO)	0
DELAY		8 30
BLANK	(NO)	0
DEFAULT	(NO)	0
% RGT VOL		60
UNITS	(mg/dL)	2
UNIT FACTOR		1.000
DECIMAL		2
RBL LOW		0.000
RBL HIGH		0.300
RANGE LOW		2.6
RANGE HIGH		900.0
CAL FACT		#
STD VAL		#
NORMAL L		0.0
NORMAL H		150.0
SLOPE		1.000
INTERCEPT		0.000
EP LIMIT		0.010

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 100,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.