

<b>Catálogo: K046-1</b>	<b>AMILASE CINÉTICA</b>	<b>Nº de Testes: 300</b>	<b>Versão: 17/07/2018</b>
-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K046-1**

Reagente N° 1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

Os reagentes são prontos para uso.

**AMILASE CINÉTICA**

Full Name	AMILASE	Test N°	#
Unit	U/L	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

**REAC. METHOD**

Method	Kinetic		
Blank	No		
Test Time	30	180	Sec

**WAVELENGTH (nm)**

WL1	405
WL2	No

**CALCULATION METHOD**

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

**CORRECTION FACTOR**

K	1
B	0

**VOLUME SETUP**

<b>NORMAL</b>			
Sample	4.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

**REFERENCE RANGE**

Male	0.0	90.0	Female	0.0	90.0
------	-----	------	--------	-----	------

**LIMITED RANGE**

Linear Range	3.5	2000.0	U/L	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0	0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.