

Catálogo: K108-1	BIOPROT U/LCR	Nº de Testes: 125	Versão: 17/07/2018
-------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

BIOPROT U/LCR

Full Name	BIOPROT	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	280 300	Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	630
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL

Sample	4.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	1.0 15.0	Female	1.0 15.0
------	-------------	--------	-------------

LIMITED RANGE

Linear Range	1.8 100.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0 0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.