

Catálogo: K010-1	CK NAC UV	Nº de Testes: 200	Versão: 27/03/2025
-------------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K010-1

Reagente Nº 1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Enzima-Substrato – 1 x 10 mL

Os reagentes são prontos para uso.

CK NAC UV			
Full Name	CK NAC	Test N°	#
Unit	U/L	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		
REAC. METHOD		WAVELENGTH (nm)	
Method	Kinetic	WL1	340
Blank	No	WL2	No
Test Time	60 180		
	Sec		
CALCULATION METHOD		CORRECTION FACTOR	
Calculation	Multi-Point Linear	K	1
		B	0
VOLUME SETUP			
NORMAL			
Sample	5.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	50.0 µL
REFERENCE RANGE			
Male	24.0 195.0	Female	24.0 170.0
LIMITED RANGE			
Linear Range	9.4 2000.0	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0 0.0	Substrate Exhaust	3.000

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.