

Catálogo: K080-2	GAMA GT CINÉTICO	Nº de Testes: 240	Versão: 17/07/2018
-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K080-2

Reagente Nº 1 – Tampão – 2 x 24 mL

Reagente Nº 2 – Substrato – 2 x 6 mL

Os reagentes são prontos para uso.

GAMA GT CINÉTICO

Full Name	GAMA GT	Test N°	#
Unit	U/L	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	Kinetic		Sec
Blank	No		
Test Time	60	180	

WAVELENGTH (nm)

WL1	405
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL			
Sample	12.5 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	50.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	0.0	55.0	Female	0.0	38.0
------	-----	------	--------	-----	------

LIMITED RANGE

Linear Range	2.6	700.0	U/L	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0	0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos a utilização dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.