

Catálogo: K084-2	LACTATO	Nº de Testes: 250	Versão: 17/07/2018
-------------------------	----------------	--------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K084-2

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente N°3 – Padrão – 1 x 3 mL

PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO PARA DOSAGEM MONORREAGENTE:

Misturar 4 partes do reagente N° 1 com uma 1 parte do reagente N° 2. O Reagente de Trabalho é estável durante 2 semanas entre 2 e 8°C.

LACTATO

Full Name	LACTATO	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	280 300	Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	340
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL			
Sample	2.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	4.5 19.8	Female	4.5 19.8
------	-------------	--------	-------------

LIMITED RANGE

Linear Range	1.0 120.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0 0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.