

Catálogo: K084-2

LACTATO

Nº de Testes: 250

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K084-2

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 2 x 20 mL

Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 5 mL

Reagente N°3 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

LACTATO

Full Name	LACTATO	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	280	300

Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	340
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL			
Sample	3.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	240.0 µL	Reagent 2	60.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	4.5	19.8	Female	4.5	19.8
------	-----	------	--------	-----	------

LIMITED RANGE

Linear Range	1.0	120.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0	0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.