

Catálogo: K116-2

**MAGNÉSIO MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 1000

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K116-2**

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 2 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

**MAGNÉSIO MONOREAGENTE**

Full Name	MAGNÉSIO	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

**REAC. METHOD**

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	60    80	Sec

**WAVELENGTH (nm)**

WL1	510
WL2	No

**CALCULATION METHOD**

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

**CORRECTION FACTOR**

K	1
B	0

**VOLUME SETUP**

NORMAL			
Sample	2.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

**REFERENCE RANGE**

Male	1.6    2.4	Female	1.6    2.4
------	------------	--------	------------

**LIMITED RANGE**

Linear Range	0.0    5.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0    0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.