

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 1250

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Full Name	PROTEÍNAS TOTAIS	Test N°	#
Unit	g/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	End Point	
Blank	R. Blank	
Test Time	300	320

Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	546
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL

Sample	4.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	200.0 µL	Reagent 2	0.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	6.0	8.0	Female	6.0	8.0
------	-----	-----	--------	-----	-----

LIMITED RANGE

Linear Range	0.0	12.0	g/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0	0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.