

Catálogo: K056-1

URÉIA UV

Nº de Testes: 665

Versão: 17/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K056-1

Reagente Nº 1 – Tampão – 2 x 80 mL

Reagente Nº 2 – Reagente Enzimático – 1 x 40 mL

Reagente Nº 3 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

URÉIA UV

Full Name	URÉIA UV	Test N°	#
Unit	mg/dL	Decimal	#
Indirect Calc.	Formula		

REAC. METHOD

Method	Two Point	
Blank	No	
Test Time	30 120	Sec

WAVELENGTH (nm)

WL1	340
WL2	No

CALCULATION METHOD

Calculation	Multi-Point Linear
-------------	--------------------

CORRECTION FACTOR

K	1
B	0

VOLUME SETUP

NORMAL			
Sample	3.0 µL	Prediluted	<input type="checkbox"/>
Reagent 1	240.0 µL	Reagent 2	60.0 µL

REFERENCE RANGE

Male	15.0 40.0	Female	15.0 40.0
------	-------------	--------	-------------

LIMITED RANGE

Linear Range	1.5 300.0	mg/dL	Linear Limit	0.0
Reagent Blank	0.0 0.0		Substrate Exhaust	0.0

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.