

Catálogo: K139-1

**ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 100

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K139-1.0**

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	ÁCIDO ÚRICO
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	505
TEMPERATURA	37
PADRÃO	6.0
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	mg/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	25 µL
VOL.DE REAGENTE	1000 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	20.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	1.5   7.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 6,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.