

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K040-1

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	ALBUMINA
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	620
TEMPERATURA	37
PADRÃO	3.8
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	g/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	10 µL
VOL.DE REAGENTE	2500 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	6.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	3.5 5.5

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.