

Catálogo: K046-1

**AMILASE CINÉTICA**

Nº de Testes: 60

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K046-1**

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

NOME	AMILASE CIN
MODO	CINÉTICA - ORD 0
FILTRO	405
TEMPERATURA	37
FATOR	3954
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	U/L
BRANCO DE REAGENTE	NÃO
DECIMAIS	1
VOLUME DE AMOSTRA	20 µL
VOL.DE REAGENTE	1000 µL
INTERVALO INICIAL	30s
INTERVALO CINÉTICO	60s   3
LIMITE DE LINEARIDADE	2000.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	0.0   90.0

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.