

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K108-1

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	BIOPROT
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	630
TEMPERATURA	37
PADRÃO	65.0
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	mg/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	20 µL
VOL.DE REAGENTE	1000 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	100.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	1.0 15.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.