

Catálogo: K051-2

**CÁLCIO ARSENAZO III**

Nº de Testes: 100

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K051-2**

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	CÁLCIO ARS III
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	630
TEMPERATURA	37
PADRÃO	10.0
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	mg/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	10 µL
VOL.DE REAGENTE	1000 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	20.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	8.8   11.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.