

Catálogo: K088-27	LDL DIRETO	Nº de Testes: 50	Versão: 09/07/2018
--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K088-27

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 30 mL

Reagente N°2 – Reagente de Cor – 1 x 10 mL

Reagente N°3 – Calibrador – 1 x 5 mL

PREPARO DO CALIBRADOR (REAGENTE N° 3) _ APRESENTAÇÃO 27:

Abrir cuidadosamente o frasco e adicionar exatamente 5 mL de água destilada. Homogeneizar e deixar em repouso por 30 minutos. Evite a formação de espuma e que o material fique aderido à parede do frasco. Estável por 1 semana entre 2 e 8°C.

TÉCNICA:

Em um tubo de ensaio pipetar 600 µL do Reagente N°1 (Enzimático) e 6 µL de Amostra ou Calibrador. Homogeneizar e incubar por 5 minutos em Banho-Maria a 37°C.

Em seguida, pipetar 200 µL do Reagente N°2 (Reagente de Cor), homogeneizar e aspirar imediatamente para iniciar a medição.

NOME	LDL
MODO	ORD 1
FILTRO	540
TEMPERATURA	37
PADRÃO	#
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	mg/dL
BRANCO DE REAGENTE	NÃO
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	6.0 µL
VOL.DE REAGENTE	800 µL
INTERVALO INICIAL	30s
INTERVALO CINÉTICO	180s
LIMITE DE LINEARIDADE	998.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	0.0 100.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 3 (Calibrador – Concentração no Rótulo) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.