

Catálogo: K116-2

MAGNÉSIO MONOREAGENTE

Nº de Testes: 200

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K116-2

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 2 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	MAGNÉSIO
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	505
TEMPERATURA	37
PADRÃO	2.0
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	mg/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	10 µL
VOL.DE REAGENTE	1000 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	5.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	1.6 2.4

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 2,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.