

Catálogo: K031-1

PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 09/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K031-1

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

NOME	PROT TOTAIS
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	540
TEMPERATURA	37
PADRÃO	4.0
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	g/dL
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	2
VOLUME DE AMOSTRA	50 µL
VOL.DE REAGENTE	2500 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	12.0
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	-
VR / VN	6.0 8.0

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.