

Catálogo: K035

TRANSAMINASE TGP

Nº de Testes: 200

Versão: 07/02/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K035

Reagente N°1 – Substrato de TGP (ALT) – 1 x 50 mL

Reagente N°2 – Reagente de Cor – 1 x 50mL

Reagente N°3 – Hidróxido de Sódio Concentrado – 1 x 40 mL

Reagente N°4 – Padrão – 1 x 4 mL

NOME	TGO
MODO	PONTO FINAL
FILTRO	505
TEMPERATURA	25
PADRÃO	0 28 57 97 150
DIREÇÃO	INC
UNIDADE	U/L
BRANCO DE REAGENTE	SIM
DECIMAIS	0
VOLUME DE AMOSTRA	100 µL
VOL.DE REAGENTE	3000 µL
TEMPO INCUBAÇÃO	3s
LIMITE DE LINEARIDADE	140
DESVIO DE ABSORBÂNCIA	-
DESVIO	-
ABS. PADRÃO	-
ABS. DO REAGENTE	0,500
VR / VN	4 32

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.