

Catálogo: K209

Fe AUTOMAÇÃO

Nº de Testes: 500

Versão: 23/01/2019

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K209-2

Reagente N° 1 – Tampão Redutor – 2 x 40 mL

Reagente N° 2 – Reagente de Cor – 2 x 10 mL

Reagente N° 3 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TEST CODE	0 000	SAMPLE BLANK ABSORBANCE CHECKS	
Name	Fe AUTOMAÇÃO	Absorbance Limit	-0,1 3
Abbreviation	Fe	Reagent Abs Limit	-0,1 3
Mode	Ponto de Desfecho	Substrate Depletion	0 Abs
Reagent Onboard Stability	1 day	Result Type	Quantitative
Reagent Low Vol Warming	5 Tests	Primary Units	µg/dL
Service Assay		Unit Conversion Factor A	-
Suppress Test Result		Unit Conversion Factor B	-
Serum	✓	Secondary Units	-
Urine	-	Decimals	0
WholeBlood (disabled)	-		
CSF (disabled)	-	REFERENCE RANGES	
(disabled)	-	Serum	
Replicates	1	Panic	0.0 0.0
Sample Blank	Yes	Male	65 170
Sample Volume	20 µL	Female	50 170
Reagent Volume -2.25 min (R1)	160 µL	Pediatric	0.0 0.0
Reagent Volume 2.90 min (R2)	40 µL	Urine	- -
Reagent Volume 4.70 min (R3)	00 µL	Whole Blood	- -
WAVELENGTH	546 nm	CALIBRATION TYPE	Calibrator
Incubation Time	6.5 min	Correlation	Factor 1.000 Offset 0.000
ABSORBANCE CHECKS		Calibrator Name	Biocal – K072
Absorbance Limit (Abs)	-0,1 3	Replicates	1
Reagent Abs Limit (Abs)	-0,1 3	Expiration Time	7 days
Reaction Direction	Increasing	Auto Predilution	-
Reagent Deviation Abs	-	Reagent Blank	✓
Substrate Depletion	0 Abs	Reag. Blank Expiration	1 day
Alinearity Limit	10 %	Reag. Blank Replicates	1
		Reag. Blank Abs Limits	-0,1 3
		Number of Points	1
		Algorithm	Linear
		Algorithm Inaccuracy	5%
		Extended Abs Limits	1 1 %
		Extended Concent Limits	0 10 %

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.